


# Skån dine fingre

- ved dialyseapparatet



## Vær opmærksom på fingrenes stilling

Belastningen af fingrene ved arbejdet ved dialyseapparatet sker, når fingrene kommer i yderstillinger – hvor fingrenes led overstrækkes.

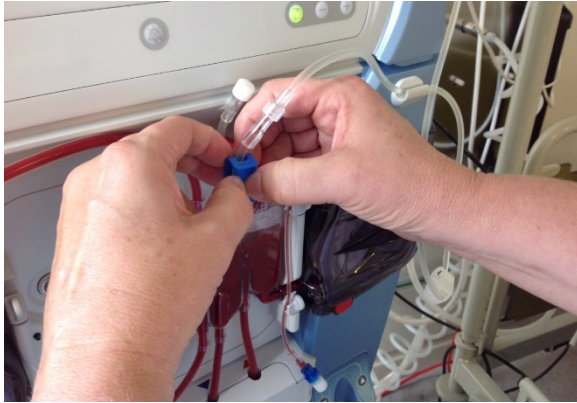

- Tommelfingrene placeres let bøjede ved siden af hinanden på klemmens ene side.
- 2 eller 3 fingre placeres let bøjede ved siden af hinanden på klemmens anden side.



- Venstre tommefinger placeres oven på koblingen - OBS bøj ikke tommelfingeren for meget



- Tommelfingrene placeres let bøjede ved siden af hinanden på klemmens ene side.
- 2 eller 3 fingre placeres let bøjede ved siden af hinanden på klemmens anden side.



- Brug så mange fingre som muligt, når holderen løftes.

**Det er vigtigt, at alle led holdes let bøjede, når der klemmes**

**Koblingen kan klikkes af på 3 hensigtsmæssige måder.**



- Pege- og langfinger let bøjet øverst på koblingen



- ...og sættes på med flad hånd eller med samme metode eller



- Tommelfinger strakt øverst på Kobling



- Tommelfinger bøje øverst på koblingen – OBS bøj ikke tommelfingeren for meget





**Arbejd altid med let bøjede fingre**

